

VILLACRYL STC

ІНСТРУКЦІЯ УПОТРЕБЛЕННЯ - RU

Характеристика продукту

Самополімеризуючий акриловий матеріал для виготовлення временных коронок і мостів, а також для временної починки коронок і мостів, облицюваних акрилом. Матеріал в виде порошка і жидкості. Предварительне формування коронки і моста і її отвердження проходить непосредственно в ротовій полості пацієнта.

Состав

Villacryl STC

Порошок: поліметилметакрилат (ПММА), 1-бензил-5-фенілбарбитурова кислота (ВРВА), бензоілероксид (БЛО), діоксид титану, лігменти, оксид кремнію.

Жидкість: метилметакрилат (ММА), диметакрилат триазілентилікон (ТГМ), 1,6-диметакрилат гександіола (1,6 НДМА), N,N-диметил-п-толуїдин (ДМРТ), гідроксіон (Н).

Параметри дії: хеміческі данні, необхідні для правильної виробки матеріалу, приведені в тексті та таблиці 1.

Способ применения препарата

Указания

Изготовление временных коронок и мостов на переходный период до времени выполнения постоянного заполнения.

Противопоказания

Не использовать изделие у пациентов с диагностированным недостаточным иммунитетом к аллергенам.

Не использовать материал для изготовления/починки временных коронок на период, превышающий 30 дн.

Не использовать изделие для других клинических областей применения, не указанных в инструкции.

Не использовать материал для изготовления/починки временных коронок из группы зубных техников.

Целевые группы/целевые группы пациентов и предполагаемых пользователей изделий

Пользователи: Стоматологи, изготавливающие временные коронки

Пациенты: Лица разных возрастов, с небольшими дефектами зубов, позволяющими использовать акриловые коронки или мости, в период протезирования до выполнения постоянного заполнения.

Побочные эффекты

Пациент во время формирования коронки может ощущать небольшой дискомфорт в ротовой полости, связанный с воздействием паров материяла на слизистую и мягкие ткани полости рта в виде легкого и непрятного вкусовых ощущений. У чувствительных пациентов это может привести к возникновению рваных рефлексов. Эти ощущения со временем уменьшаются до полного исчезновения.

Раздражение, покраснение или признаки гиперчувствительности, в том числе анафилактический шок, могут возникнуть в случае алергии на какой-либо из компонентов изделия.

Возможное возникновение раздражения и воспаления ротовой полости, вызванного грибками и бактериями, присущими к коронке или мости, изготавливаемому из материала, при отсутствии надлежащей гигиены.

Клинические противопоказания

Восстановление до момента выполнения постоянного протезирования с целью восстановления утраченного прикуса и функции жевания в результате частичной потери зубов.

Улучшение внешнего вида, комфорта и самочувствия во время периода лечения и ожидания постоянного восстановления зубов лицами, утратившими свою естественные зубы.

Лица временных коронок, облицованных акрилом, поврежденных во время эксплуатации.

Повышение комфорта и улучшение самочувствия пользователей коронок, облицованных акрилом, пострадавших от механических повреждений, полученных во время эксплуатации.

Дані, необхідні для ідентифікації продукту іодержимого упаковки

Номер, название продукта, цвет, размер упаковки, номер партии и срок годности - напечатано на упаковке продукта.

Содержимое упаковки - см. Таблица ниже.

Асортимент*

Расцветка

Villacryl STC	1	2	3
---------------	---	---	---

Упаковка

	Набор порошок + жидкость	Порошок	Жидкость	Отвердитель
Villacryl STC	Villacryl STC порошок 3 x 20 г + жидкость 40 мл + отвердитель 40 г	20 г	40 мл	40 г

* Информация о доступности асортимента предоставляет дистрибутор.

Способ использования (показовая инструкция)

Подготовительные операции:

Тщательно ознакомиться с содержанием инструкции перед первым использованием препарата.

Формование коронки или моста и его предварительное отвердение происходит вту пациента. Перед использованием материала необходимо убраться, что у пациента отсутствует диагноз пониженному иммунитету к аллергенам веществам, или что он не гиперчувствителен к вкусовым и ароматическим ощущениям. В противном случае рекомендуется применение другого препарата.

Использовать перчатки, защитную маску и защитную одежду в соответствии со стандартами, действующими в стоматологических кабинетах, и процедурами по защите здоровья и безопасности медицинского персонала и пациентов.

Подготовка

Подготовка зубов

Взять склон зубовой полости пациента, отражающий состояние перед шлифовкой зубов, или подготовить стандартную форму, соответствующую размеру зуба.

Подготовить зубы под коронку путем их шлифовки в соответствии с текущим уровнем знаний и техники для данного процесса лечения.

Приготовление материала

Подобрать правильный цвет материала, напоминающий естественный цвет зубов пациента.

Встряхнуть емкости с порошком и жидкостью 2 или 3 раза, чтобы облегчить дисперсию порошка в мономере.

Аллергические реакции:

Жидкость, перекись бензона, содержащаяся в полимере, и пыль, образующаяся в процессе обработки и шлифовки

Інструкція з експлуатації - UK

Інформація і смішування інгредієнтів

Рекомендовані пропорції смішування:

Небодійно уникати собіття указані пропорції смішування. Несоблюдение указаних значень може привести до ображанії пористої структури коронки, сниження її механічних властивостей і збільшення вмісту метилметакрилатного мономера в готовій суміші.

Контакт з глазами:

Случайні прямі контакти компонентів препарату з очима можуть привести до втрати зору.

Смішування інгредієнтів:

В хімічному устойчивому сусідстві (кераміка, фарфор, скло або нержавіюча сталь) тщательно смішувати 2 г порошку з 1 г (-1 мл) мономера і вилити в подготовлену стандартну форму або ліпок, узятий перед шлифуванням зуба. Час смішування не повинен перевищувати 1 хвилину.

Формування коронки:

Во время формування обработані зуби изолювати вазелином.

Коронку зі скло-з матеріалом поместити на 4 мінuty в ротову полость пацієнта. В цей час пацієнт може відчувати невеликий дискомфорт в ротовій полості, пов'язаний з дією парів мономеру на слизову оболонку або ніжкими тканями порожнини рота, вигляд легкого пінчіння або непріємних вкусових відчуттів. Ці змінення зникають відразу після завершення відвердження.

Меры предосторожности

Стоматолог:

Не використовувати вироб в разі диагностированого пониженному иммунитету пацієнта.

Параєтолог:

Не використовувати вироб в разі диагностированого пониженному иммунитету пацієнта.

Склад:

Villacryl STC

Порошок: поліметилметакрилат (ПММА), 1-бензил-5-фенілбарбитурова кислота (ВРВА), бензоілероксид (БЛО), діоксид титану, лігменти, оксид кремнію.

Жидкість: метилметакрилат (ММА), диметакрилат триазілентилікон (ТГМ), 1,6-диметакрилат гександіола (1,6 НДМА), N,N-диметил-п-толуїдин (ДМРТ), гідроксіон (Н).

Параметри дії: Технічні данні, необхідні для правильного використання матеріалу, приведені в тексті та таблиці 1.

Способ застосування препарата

Стоматолог:

Не використовувати вироб в разі диагностированого пониженному иммунитету пацієнта.

Параєтолог:

Не використовувати вироб в разі диагностированого пониженному иммунитету пацієнта.

Склад:

Villacryl STC

Порошок: поліметилметакрилат (ПММА), 1-бензил-5-фенілбарбитурова кислота (ВРВА), бензоілероксид (БЛО), діоксид титану, лігменти, оксид кремнію.

Жидкість: метилметакрилат (ММА), диметакрилат триазілентилікон (ТГМ), 1,6-диметакрилат гександіола (1,6 НДМА), N,N-диметил-п-толуїдин (ДМРТ), гідроксіон (Н).

Параметри дії: Технічні данні, необхідні для правильного використання матеріалу, приведені в тексті та таблиці 1.

Способ застосування препарата

Візажист:

Виготовлення тимчасових коронок і мостів в ротовій порожнині (кераміка, фарфор, скло або нержавіюча сталь) рельєфом з язиком і слизовою оболонкою пацієнта. Після завершення відвердження коронку вилити надлишкові матеріали.

Противопоказання

Не використовувати вироб в разі диагностированого пониженному иммунитету пацієнта.

Інші показання:

Не використовувати вироб в разі диагностированого пониженному иммунитету пацієнта.

Останочна обробка коронки:

Виготовлення коронки обробити і рельєфом з язиком і слизовою оболонкою пацієнта.

Противопоказання

Не використовувати вироб в разі диагностированого пониженному иммунитету пацієнта.

Інші показання:

Не використовувати вироб в разі диагностированого пониженному иммунитету пацієнта.

Коронка зі скло-з:

Виготовлення тимчасових коронок і мостів в ротовій порожнині (кераміка, фарфор, скло або нержавіюча сталь) рельєфом з язиком і слизовою оболонкою пацієнта.

Інші показання:

Не використовувати вироб в разі диагностированого пониженному иммунитету пацієнта.

Коронка зі скло-з:

Виготовлення тимчасових коронок і мостів в ротовій порожнині (кераміка, фарфор, скло або нержавіюча сталь) рельєфом з язиком і слизовою оболонкою пацієнта.

Інші показання:

Не використовувати вироб в разі диагностированого пониженному иммунитету пацієнта.

Коронка зі скло-з:

Виготовлення тимчасових коронок і мостів в ротовій порожнині (кераміка, фарфор, скло або нержавіюча сталь) рельєфом з язиком і слизовою оболонкою пацієнта.

Інші показання:

Не використовувати вироб в разі диагностированого пониженному иммунитету пацієнта.

Коронка зі скло-з:

Виготовлення тимчасових коронок і мостів в ротовій порожнині (кераміка, фарфор, скло або нержавіюча сталь) рельєфом з язиком і слизовою обол