


VILLACRYL SOFT | Інструкція по приготуванню




Зняти функціональний зліпок із протезу.



Відлити функціональний зліпок на протез, використовуючи гіпс **Stodent III**.

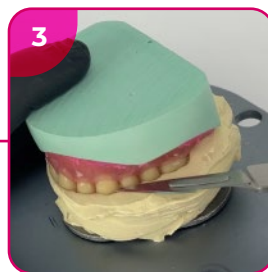


Зафіксувати модель з протезом у рамі, що перебазує (до максимальної опуклості зубів).

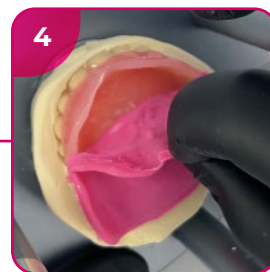


Зняти протез з моделі та видалити відбитковий матеріал.



Укоротити краї протезної пластини на 2-3 мм і зробити в протезі ступінчастий надріз 1 мм на 1,5 мм за допомогою фрез **4Shine Cutter AC**.

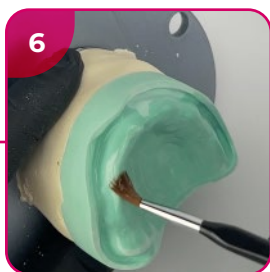

За допомогою пензлика двічі покрити гіпсову модель ізолюючою рідиною **Izo-Sol**. Дочекається утворення ізоляційної плівки.

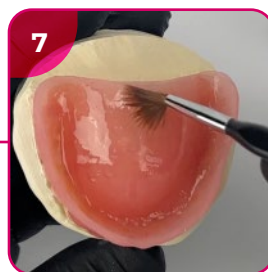

Місце перебазування протерти мономером, щоб знежирити.



Відміряти 1 г рідини на 1,5 г порошку.



Відміряти 1 г рідини на 1,5 г порошку.



Перемішати в хімічно стійкій ємності та дочекатися гелеутворення.



Покласти масу на поверхню підкладки та ізольовану гіпсову модель.



Помістити протез на модель та видалити зайву масу.



Затягнути гвинти рами для перебазування та полімеризувати протягом 30 хвилин при температурі 65°C та тиску 2 бар.




Скальпелем видалити надлишки полімеризованого **Villacryl SOFT**.



Вирівняти краї протеза за допомогою фрези **4Shine EC 274.176.060**.



Попередньо відполірувати протез полірувальним порошком **4Shine HARD**.

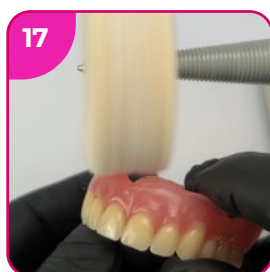

Відполірувати протез до блиску полірувальною пастою **4Shine ACRYLIC**.



Нанести тонкий шар лаку на поверхню підкладки, повторити процедуру приблизно через 2 хвилини.



Готовий протез із підкладкою.



ДИВИСЬ!