

Профілактика проблем (2)
Див. Веб-сайт www.everall7.pl

Будь-які коментарі про нашу продукцію просимо надсилати на нашу адресу.

Інформація, надана будь-яким іншим способом, навіть під час демонстрації, не відміняє інструкції по застосуванню. Користувачі несуть відповідальність за перевірку придатності продукту для передбачуваного використання. Виробник не несе відповідальності за збитки, в тому числі заподіяну третім особам, що виникли в результаті недотримання інструкцій або непридатності для використання. Відповідальність виробника в будь-якому випадку обмежується вартістю поставленої продукції.

MD Цей символ позначає медичний виріб відповідно до визначення в Регламенті UE 2017/745.

Уповноважений представник в Україні:

ТЗОВ «Прем'єр Дентал»,
вул. Лепкого 3, кв. 1, 79007 Львів, Україна;
тел.: +38 (0)2 259-04-44;
E-mail: premier@dental.net.ua

WEB: www.premier-dental.com.ua

Виробник:

 Everall7 Sp. z o.o.
Августува 14
02-981 Варшава, Польща

 Everall7 Sp. z o.o.
Augustówka 14
02-981 Warszawa, Polska

Останнє оновлення інструкції: 2024-02



 everall7

VILLACRYL H PLUS VILLACRYL H RAPID VILLACRYL H RAPID FN

Heat curing acrylic resin for dental denture bases

UK

 Everall7 Sp. z o.o.
uL Augustówka 14 | 02-981 Warszawa; Polska
T +48 22 858 82 72 | info@everall7.pl
www.everall7.pl

